



Horse

Kedves LENYO Horse Tulajdonos!

Köszönjük, hogy a **Hippocampus-BRT Kft.** által fejlesztett és gyártott wellness készüléket választotta.

A **Hippocampus-BRT Kft.** több évtizedes kutatási háttere és innovációs stratégiája biztosítja, hogy Ön a legmodernebb, mindemellett az állati test működésének törvényeit a legmesszebbmenőkig figyelembe vevő eszközt használhasson.

A **LENYO Horse** egy lovak számára kifejlesztett pulzáló mágneses teret kibocsátó wellness készülék. Programok komplex szimfóniáját tartalmazza, amelyek használhatók a lovak teljesítményének optimalizálására, komplex egészségvédelemre, utazáskor, lovaglás és verseny előtti felkészüléskor. Működtetése egyszerű, mert a kívánt programkombináció a SELECT gombbal egyszerűen kiválasztható és utána a START gomb megnyomásával el is indítható. Különlegessége, hogy egy programkombináció elindításával igény szerint egyszerre négy különálló, de összehangolt (előre programozott) programcsomag futtatható, a négy különálló kimenetre csatlakoztatott jelkibocsátón.

Használata egyszerű és kényelmes, mégis igen hasznos, ha végigolvassa ezt a tájékoztatót. A használati utasítás olvasása alatt tartsa a **LENYO Horse** készüléket maga előtt, hogy az ismereteket azonnal átültethesse a gyakorlatba.

Amennyiben a használat során további kérdései merülnek fel, a **Hippocampus-BRT Kft.** munkatársai készséggel nyújtanak további információt.

Fontos tudnia, hogy a készülékek használata az állatorvosi ellátást nem pótolja, ugyanakkor oly módon alkalmazhatók mellette, hogy a fizikai közérzetre kedvező hatást gyakorolhatnak kellemetlen mellékhatások nélkül, így teljes biztonsággal használhatók.

A készülék CE jelzéssel ellátott wellness eszköz, egészségre gyakorolt kedvező hatása nem bizonyított.

A gyártó a fejlesztés jogát fenntartja magának, ennek következtében előfordulhat, hogy a konstrukció a leírástól néhol kis mértékben eltér. Az eltérés mindenkor a magasabb műszaki színvonal megvalósítását célozza.

Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások	5
A készülék és tartozékai	7
A készülék kezelési utasítása	8
A kiegészítők használata	11
A programcsomagok használatáról	12
A LENYO Horse programjai	13
Hibaelhárítás	18
A készülék karbantartása, tisztítása	19
A LENYO Horse műszaki adatai	20
Garancia	21

Biztonsági előírások

- A használatba vételt megelőzően tanulmányozza a kezelési utasítást és mindenben az abban foglaltak szerint járjon el! A készülékeket és tartozékaikat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja!
- Soha se használja a készüléket, ha annak vagy tartozékának kábele/csatlakozója/burkolata sérült, vagy rendellenesen működik! Semmi esetre se bontsa meg a készülék burkolatát és a jelkibocsátó felületet (antennát)! Meghibásodás esetén forduljon garanciális szervizünkhöz!
- Ne használja a készüléket nedves környezetben!
- Ne helyezzen vizet vagy bármilyen más folyadékot tartalmazó edényt a készülékre, ügyeljen rá, hogy ne érhesse állati vizelet!
- Ha a készüléket nagyon hideg környezetben szállította, tárolta, pl. hosszabb időn keresztül 0 C° alatt volt, és utána egy meleg helységben kívánja üzemeltetni, a páralecsapódás okozta belső nedvesség megzavarhatja a működést, ezért csak azután kapcsolja be azt, ha már felmelegedett szobahőmérsékletre!
- A készüléket és elemeit ne tárolja közvetlen napsugárzásnak, sugárzó hőnek vagy magas páratartalomnak kitett helyen!
- Óvja a készüléket és tartozékait az erős rázkódástól, ütődéstől, fizikai behatástól!
- Ügyeljen rá, hogy gyermekek, illetve korlátozott cselekvőképességű személyek a terméket csak felügyelet mellett használják!
- Ügyeljen rá, hogy az állat ne rágja meg a készülék vagy kiegészítőinek kábeleit! Figyelem: az elektromos hálózathoz vezetékkel csatlakozó hálózati adapter kábelének sérülése életveszélyes áramütést okozhat!
- A készülék speciális elektronikai elemeket tartalmaz, felhasználó által nem javítható. A pontos és hatékony jelkibocsátás érdekében a garanciális és garancián túli javítását is csak a gyártó vagy megbízott szakszervize végezheti.

- A már nem javítható készüléket - környezetvédelmi szempontok miatt - soha ne dobja a szemétkukába, kizárólag elektronikai hulladékot begyűjtő helyen vagy a gyártó telephelyén adja le!
- A készülék működtetése csak a gyártó által biztosított tartozékokkal/kiegészítőkkel biztonságos. Ne csatlakoztasson olyan eszközöket (pl. adapter) ezekbe a csatlakozóaljzatokba, amelyeket nem a **LENYO Horse** készülék gyártójától vásárolt, mert a készülék működését veszélyeztetheti.
- A jelkibocsátó (antenna) csatlakozó kábele az antennából nem eltávolítható, annak húzása, rángatása az antenna nem javítható károsodásához vezethet.
- A csatlakozó alkatrészek összekapcsolását mindig körültekintően, erőltetés nélkül végezze!

A készülék és tartozékai

A készülék előre programozott, összesen 10 normál (40-76 perces) programcsomag kombinációt tartalmaz.

A LENYO Horse készlet összetétele:

- Az előre elkészített programokat magában foglaló vezérlőegység / jelgenerátor
- Hálózati adapter
- Jelkibocsátók: 1 db „Full” lótakató antenna, 1 db „Has” antenna, 4 db „M”-es antenna (lábakra)
- Felhasználói kézikönyv
- Hordtáska 2 db
- Neszesszer

Külön megvásárolható, opcionális tartozékok:

- Állvány (a jelgenrátor rögzítésére, tartására szolgál)
- Autós töltő
- Jelkibocsátók: „Light” lótakaró antenna, „Full” lótakaró antenna, „Has” antenna, „S”, „M” antenna

A készülék kezelési utasítása

A készülék kezelőgombjai

A **LENYO Horse** kezelőfelületének kialakításakor elsődleges szempontként az egyszerűséget és átláthatóságot vettük figyelembe. A kezelőgombok és programkombinációk nevei a jelgenerátor előlapján helyezkednek el. Csak két kezelőszerv, egy START és egy SELECT nyomógomb található az előlapon, melyek segítségével a kívánt programkombinációk könnyedén kiválaszthatók és futtathatók.



A **LENYO Horse** készülék beépített akkumulátorokkal rendelkezik, ezért a hálózattól függetlenül is üzemeltethető. Az akkumulátor és a töltés állapotát az előlap jobb felső sarkában található akkumulátor szimbólum mellett elhelyezett LED fénye mutatja. Töltés közben (hálózati adapter csatlakoztatva) sárga fénnel világít. Akkumulátoros üzemben (hálózati adapter kihúzva) folyamatos zöld fénnel világít. Ahogy az akkumulátor merül (feszültsége csökken) a zöld fény villogni kezd, végül – a teljes lemerülés előtt – a zöld és a (zárlatjelzésre szolgáló) piros fény felváltva kezd villogni.

Teljesen feltöltött, hibátlan akkumulátorral legalább négy protokoll futtatható.

1. Amennyiben az akkumulátor lemerült, úgy csatlakoztassa **LENYO Horse** készülékét az elektromos hálózathoz oly módon, hogy a mellékelt adaptert először az elektromos hálózatba, majd az adapter kimeneti dugóját a készülékbe dugja be (12V=).
2. Miután az akkumulátor feltöltött, csatlakoztassa a jelkibocsátó antennákat a jelgenerátor megfelelő csatlakozóihoz. A jelkibocsátók javasolt elrendezése a következő:
 - **A** kimenet „Full” lótakaró antenna
 - **B** kimenet „Has” antenna
 - **C** kimenet 2 db „M” méretű antenna, első lábak
 - **D** kimenet 2 db „M” méretű antenna, hátsó lábak

Igény szerint falvédőbe épített antenna is rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

3. A START nyomógombot röviden megnyomva az előlap bal felső részén található, kékszínű LED-eken (7 db) végigfut a fény és kigyullad a „Digestion” programkombinációhoz tartozó piros fény. Ezen kívül kigyullad az összes többi programkombináció LED-je is fél fényerővel. Ezután a SELECT gomb lenyomásával sorban léptetheti a programkombinációkat, amíg el nem éri azt, amelyiket futtatni kívánja. A START gombot röviden megnyomva a kék színű ledekből a középső három felvilágít majd a ké-

szülék hangjelzést ad és a kiválasztott programkombináció rövid verziója elindul. A futtatott programkombináció fénye világít. A hosszú programkombináció indításához tartsa a START gombot addig lenyomva, ameddig mind a hét kék led világít, majd engedje el. (Ilyenkor egyszerre négy különböző programcsomag indul el és vezérli a kimenetekre kapcsolt jelkibocsátókat.) A program futása során (az eltelt idő kijelzése céljából) az egyes programok jelzőfényei balról jobbra haladva sorra kigyulladnak, fél fényerővel, időarányosan a futás állapotával. (Egy led a programkombináció futásidejének a 12-ed részét jelzi.) A programkombináció futásidejének a végén már az összes LED világít. A programkombináció lefutása után 2 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

4. A START nyomógomb hosszabb (5-6 másodperces) folyamatos lenyomásával a programkombináció bármikor leállítható. A leállást hangjelzés kíséri.



A kiegészítők használata

A **LENYO Horse** használatakor a jelkibocsátók javasolt elrendezése a következő:

- A „Full” lótakaró antenna a ló hátán és nyakán, a „Has” antenna a ló hasán, az „M”-es antennák a ló lábain rögzítve.
- Amennyiben ez technikailag megoldható, azonos programcsomagot futtatva, a készüléket két ló, egyszerre is használhatja.
- Falvédőbe épített jelkibocsátók esetén a készülék egy állvánnyal a falra szerelhető, ami megkönnyíti a használatot.



A programcsomagok használatáról

A **LENYO Horse** készülék 10 programcsomagját alkalmazhatja a ló egészséges állapotában, közérzetének javítására, teljesítményének optimalizálására, vagy egészségügyi problémák, balesetek, sérülések esetén, műtétek előtt és után, amikor fokozott szükség van az állati szervezet harmonikus működésére. Önnek csak azt a programcsomagot kell kiválasztania, amely hatásait tekintve leginkább lefedi a ló állapotára jellemző – a programcsomagok leírásában megadott – tünetcsoportot. A programcsomagok mindegyike több egymásra épülő alprogramból áll, ezért futásukat menet közben ne szakítsa meg! A programcsomagot alkotó teljes alprogramsor lefutása után a készülék automatikusan leáll. A készülék különlegessége, hogy egy program elindításával egyszerre négy különálló, de összehangolt (előre programozott) programcsomag fut, a négy különálló kimenetre csatlakoztatott jelkibocsátókon, fokozva ezzel a kívánt hatást. Az programcsomagok is több – a Hippocampus korábbi készülékeinél már bevált – program kombinációjából tevődnek össze.

Fontos: A közérzetjavítás hatékonyságát jelentősen befolyásolja a megfelelő folyadékbevitel. A mennyiben az állatnál szokatlan viselkedést, vagy egyéb egészségi változást észlel, forduljon állatorvoshoz.

A készülék használata során a következő irányelveket tartsa szem előtt:

- Érdemes a készülék használata során betartani a fokozatosság elvét.
- Ha túlzott használatnak tulajdoníthatóan az állat viselkedésében átmenetileg szokatlan magatartást tapasztal (pl.: fáradság, nyugtalanság), függesse fel a készülék használatát és legközelebb rövidebb ideig, ritkábban használja.
- A használat idején a különböző zavaró magas sugárzású elektromos készülékek (pl.: televízió, számítógép, monitorok) működése csökkentheti a hatékonyságot, ezért javasolt a lovat ezekről távol tartani.

- Egy alkalommal maximum 2 programcsomagot használjon közvetlenül egymás után.
- Fontos, hogy a jelkibocsátó mindig a tüneteket mutató felülethez a lehető legközelebb helyezkedjen el.

A LENYO Horse programjai

A következőkben röviden ismertetjük a **LENYO Horse** készülék 10 programját, melyek közül kiválaszthatja a lova állapotának leginkább megfelelőit. Az egyes programok különböző hosszúságúak, ezért az adott program neve után zárójelben, perc és másodperc jelöléssel tüntettük fel a pontos időtartamot. A lovára gondosan odafigyelő tenyésztőnek, lóápolónak és lovasnak 4 program rendszeres használatát javasoljuk: **emésztés, ízület, izomzat, relaxáció.**

A készülék az egyes programok leírásában megnevezett panaszok, egészségi problémák kezelésére nem alkalmas, ezek említése pusztán az ajánlott program kiválasztásához nyújt segítséget.

DIGESTION/EMÉSZTÉS

🕒 (52:07)

- ha a táplálék előemésztése (a rágás, nyáltermelés) elégtelen;
- ha az állat hirtelen nagy energiatartalmú táplálékot (pl. szemes takarmányt, friss kukoricát, vágott fűvet) fogyaszt, vagy a szervezetében hirtelen felszabaduló nagy mennyiségű energia könnyebb feldolgozására van szükség;
- a savós patairha gyulladás kialakulása esetén – a „Csont-pata” program mellett;
- emésztőszervi rendellenességek esetén;
- gyomorfekély esetén;
- tökéletlen emésztés esetén;
- időjárás változásra érzékeny állatok esetében – az „Utazás” program kiegészítéseként;

- mérgezés esetén (pl. penészes takarmány toxinjának, illetve mérgező növények toxinjainak könnyebb feldolgozására) – a „Sérülés” és a „Regeneráció” programokkal együtt;
- kiválasztó szervek kezelésekor;
- nem megfelelő állagú széklet esetén;
- bélhurut, gyomorhurut esetén.

Nem feltétlenül szükséges a lábakra jelkibocsátót helyezni, de a program teljes potenciájának kifejtése érdekében javasolt.

JOINT/ÍZÜLET

🕒(65:13)

- ízületi bántalmak esetén;
- a terhelés utáni gyors regeneráció szükségessége esetén – a „Regeneráció” és az „Izom” programokkal együtt;
- ízületi fájdalom esetén;
- rendellenes kopás esetén (ilyenkor az „Izom” programot is érdemes használni);
- csontszaporulat, csontburjánzás esetén;
- osteoporosis esetén – a „Csont és pata” program kiegészítéseként;
- porcleválás esetén (a „Csont és pata” program kiegészítéseként);
- az ízületen belüli és az ízület körüli struktúrák sérülése esetén (pl. ín, ínhüvely, ízületi tok, szalag, stb.);
- korábbi ízületi sérülések utókezelésénél, tekintet nélkül arra, hogy milyen régen keletkezett a sérülés – a „Sérülés” program kiegészítéseként;
- az ízületek optimális anyagcseréjét fenntartó kezeléskor – az „Emésztés” programmal együtt;
- fokozott igénybevétel esetén – a „Regeneráció” program kiegészítéseként;
- hosszan tartó terhelés vagy versenysportban való túlzott igénybevétel esetén.

BONE AND HOOF/CSONT ÉS PATA

🕒(67:35)

- patairha gyulladás kezelésekor, a „Sérülés” és az „Emésztés” programokkal együtt;
- gyógyulófélben lévő pata esetén;
- csontozatot is érintő sérülések kezelésekor a „Sérülés” program kiegészítéseként;
- túlzott igénybevétel esetén (pl. verseny);
- folyamatos túlzott igénybevétel, nagy terhelés, illetve magas fizikai intenzitással járó betanítás esetén (pl. hosszú edzések, folyamatos versenyezés, hosszú túrák, stb.);
- műtéti hegek lassabb regenerációja esetén – a „Sérülés” program kiegészítéseként;
- végtagproblémák esetén – az „Ízület”, „Hát” és az „Izom” programok kiegészítéseként.

MUSCLE/IZOM

🕒(52:44)

- edzések után, a „Regeneráció” program kiegészítéseként;
- edzések során, illetve az izomzatot megterhelő munka előtt és után (a bemelegítés és a levezetés részét is képezheti az „Izom” program);
- prevenciós céllal a mikrosérülések ellátására és jó kondíció eléréséhez;
- mikro- és makro izomsérülések, izomfájdalmak, valamint túlterhelés esetén;
- a nagy izmok (pl. farizom) görcsössé válása esetén;
- manuálterápia kiegészítéseként különösen ajánlott ennek a programnak a futtatása;
- izomláz (laktátszint megemelkedése) esetén, mert a mérések szerint hamarabb csökken a laktátszint a program használatakor (amikor az anyagcsere melléktermékek elszállításának gyorsítására van szükség).

BACK/HÁT

🕒(74:09)

- a hátizmok tartós igénybevétele és a gerinc regenerációja esetén;
- tartós és egyoldalú terhelés esetén, illetve mindenféle krónikus mozgásszervi panasz esetén;
- háti fájdalomok esetén (nyeregtörés) – a „Sérülés” programmal együtt;
- hosszú ideig tartó igénybevétel esetén – a „Regeneráció” és az „Izom” programokkal együtt;
- ha nyergeléskor fájdalomra utaló magatartást tanúsít a ló, amely mögött hátfájás húzódhat meg;
- a manuálterápia kiegészítéseként – az „Ízület” programmal együtt;
- sportsérülés regenerációja esetén – a „Sérülés”, az „Izom” és az „Ízület” programokkal együtt.

Nem feltétlenül szükséges a lábakra jelkibocsátót helyezni, de a program teljes potenciájának kifejtése érdekében javasolt.

RESPIRATORY/LÉGZÉS

🕒(63:18)

- ha keheesség, COPD, vagy légúti allergia tünetei jelentkeznek;
- ha gyulladásos légúti betegség tünetei jelentkeznek;
- köhögés, orr gennyes folyása esetén;
- vírusos, gombás, bakteriális fertőzöttség esetén – a „Sérülés” és a „Regeneráció” programok kiegészítéseként;
- hörgősség esetén;
- ha allergiás tünetek lépnek fel;
- légzőszervi megbetegedések esetén;
- hideg víz fogyasztása esetén;
- ha megfázás, meghűlés tünetei jelentkeznek.

Nem feltétlenül szükséges a lábakra jelkibocsátót helyezni, de a program teljes potenciájának kifejtése érdekében javasolt.

RECOVERY/REGENERÁCIÓ

🕒(52:58)

- edzések, betanítások után ajánlott lefuttatni minden alkalommal;
- fáradtság esetén;
- fokozott terhelés utáni tünetek kezelésekor;
- betegség és sérülés utáni felépülési időszakban;
- hosszú utazás utáni stressz tüneteinek kezelésekor (az „Utazás” és a „Relaxáció” programokkal együtt);
- bármely más programmal jól kombinálható.

INJURY/SÉRÜLÉS

🕒(76:08)

- bármilyen gyulladás esetén, bármelyik szerv akut folyamatai alatt;
- felületi és mély sérülések esetén (pl. nyeregtrés, bőrsérülés);
- a bőr és a bőr alatti kötőszövet, valamint egyéb szövetek gyulladása esetén;
- sebek, sérülések, fájdalom esetén;
- új és régi hegek kezelése esetén;
- bármely más programmal jól kombinálható, azt kiegészíti.

RELAX/RELAXÁCIÓ

🕒(39:57)

- korábbi rossz élmények feldolgozásához, az állat viselkedésének normalizálásához;
- idegen környezetbe helyezés esetén – az „Utazás” programmal kombinálható;
- túlzott igénybevétel esetén – a „Regeneráció” program kiegészítéseként;
- ló temperamentumától függően stressz esetén;
- manuálterápia előtt;
- bármely más programmal jól kombinálható.

Nem feltétlenül szükséges a lábakra jelkibocsátót helyezni, de a program teljes potenciájának kifejtése érdekében javasolt.

TRAVEL/UTAZÁS

🕒(68:22)

- utazás alatt, illetve az utazás előtti és utáni időszakokban;
- utazás közbeni stressz esetén – a „Relaxáció” program kiegészítéseként;
- utazással járó fokozott igénybevétel esetén;
- új környezetbe való szoktatáskor – a „Relaxáció” és a „Regeneráció” programokkal együtt;

Nem feltétlenül szükséges a lábakra jelkibocsátót helyezni, de a program teljes potenciájának kifejtése érdekében javasolt.

Hibaelhárítás

Hibajelenség: Egyáltalán nincs működés

Lehetséges ok: Nincs tápfeszültség

Javítás: Csatlakoztassa a hálózati adapter kimeneti dugóját a készülékhez, csatlakoztassa az adaptert az elektromos hálózathoz. Amennyiben nincs áramszünet, akkor vagy az adapter, vagy a készülék hibás. Szakszerviz.

Hibajelenség: A készülék zárlatot jelez : készülék felfüggeszti a program futtatását, szirénahang jellegű vészjelzést ad és kigyújtja a piros vészjelző LED-et.

Lehetséges ok: Elektromos zárlat

Javítás: Húzza ki a jelkibocsátót és indítsa újra a készüléket. Ha a zárlat megszűnt, a készülék jelkibocsátó nélkül működik akkor a jelkibocsátó zárlatos, ha nem, akkor a készülék hibás. Több jelkibocsátó esetén a jelkibocsátók egyenkénti csatlakoztatásával ellenőrizze le azokat és a hibás egység beazonosítása után, a hiba elhárítása érdekében forduljon a készülék forgalmazójához vagy az illetékes szakszervizhez. Amennyiben a vészjelző a jelkibocsátó egységek eltávolítása után is világít, azonnal távolítsa el

a készülékből a hálózati adapter csatlakozóját, majd kapcsolja ki a készüléket. A hiba elhárítása érdekében forduljon a készülék forgalmazójához vagy az illetékes szakszervizhez.

Hibajelenség: A nyomógomb nem működik

Lehetséges ok: Kontakthiba

Javítás: Szakszerviz.

A készülék karbantartása, tisztítása

A készülék, illetve a jelkibocsátó felület (matrac), a sérülésmentesség használat előtti szemrevételezésén kívül, nem igényel különleges karbantartást. A tisztítást szükség esetén nedves vagy száraz, antisztatikus törlőkendővel, puha kefével, vagy szivaccsal végezze. A törlőkendő, kefe, vagy szivacs nedvesítésére kizárólag tiszta vizet használjon.

A ló faránál higiéniai okokból javasoljuk egy alátét anyag (lehetőleg vízhatlan) használatát, hogy az állati ürülék ne szennyezhesse be az antennát.

A LENYO Horse műszaki adatai

Modell:	LENYO
Típus:	Horse
Működési elv:	pulzáló mágneses tér gerjesztése előre meghatározott programkombináció szerint
Kezelőszerv:	2 db nyomógomb; START és SELECT
Kijelző:	7 db kék világító dióda (LED) – protokollfutást jelző LED 1 db– zárlat/vészleállást jelző LED 1 db akkumulátor/töltés állapotjelző LED (csak 4A és 8A esetén) 10 db piros világító dióda (LED) választott protokoll kijelzése, futásidő kijelzése rövidzár
Vészjelzés:	
Programkombinációk száma:	10
Kimenetek száma:	4 illetve 4A esetén 4, 8 illetve 8A esetén 8
Jelkibocsátó:	antenna (beépített speciális sugárzók)
Mágneses indukció (a jelkibocsátó felszínén):	10 μ T (micro Tesla) (az alapharmonikus amplitúdója csúctól csúsig; a teljes frekvenciatartományban)
Frekvenciatartomány:	1 Hz – 200 kHz (-3dB)
Tápellátás:	12 V-os DC kapcsolóüzemű tápegység (90 V – 240 V AC, 50/60 Hz, min. 25W)
Működési hőmérséklet:	+5 °C – +40 °C
Tárolási hőmérséklet:	-20 °C – +50 °C
Relatív páratartalom:	max. 80 %
Jelgenerátor mérete [mm]:	220 x 200 x 75/25
Jelkibocsátó mérete [mm]:	M méret: 500 x 300 „Full” lótarakó méret: 2500 x 1900 „Has” antenna méret: 800 x 800
Jelgenerátor tömege:	450 g
Gyártó:	Hippocampus-BRT Ltd.
Származási hely:	EU

Garancia

A Hippocampus-BRT Kft. a vonatkozó előírások szerint a készülékre 3 év, a tartozékokra 12 hónap garanciát vállal. A garancia a készülék (számla szerinti) üzembe helyezésének időpontjától számít. Garanciális problémákkal kérjük, forduljon bizalommal a terméket értékesítő partnerünkhöz. Amennyiben bármilyen okból nem tud kapcsolatba lépni kereskedőjével, kérjük, jelezze garanciaigényét az alábbi elérhetőségeink valamelyikén:

Postacím:

Hippocampus-BRT Kft.
1082 Budapest, Baross utca 3.
Tel.: 06-1-411-0469
Honlap: www.lenyo.hu
E-mail: lenyo@lenyo.hu

DECLARATION OF CONFORMITY

MANUFACTURER: HIPPOCAMPUS-BRT LTD.
H-1097 Budapest, Illatos út 9.
Hungary

PRODUCT NAME: LENYO SPORT

We herewith declare that the above mentioned product complies with the requirements of 2006/95/EC – Low Voltage Directive (LVD); 2004/108/EC – Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) and 2011/65/EC - Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS).

STANDARDS APPLIED: EN ISO 9001:2009
EN 55011:2010
EN 60601-1-2:2008
EN 61000-3-2:2006
EN 60335-2-23:2003
EN 60335-2-23:2003/A1:2011
EN 60335-2-23:2003/A1:2008



PLACE AND DATE OF ISSUE: Budapest, 25th of September, 2014.


Gábor Lednyiczky
Managing Director

HIPPOCAMPUS-BRT KFT.
1097 Budapest, Illatos út 9.

Hippocampus-Brt Kft.
1097 Budapest, Illatos út 9.
Tel: (+36)-1-411-0469, Fax: (+36)-1-328-0420
info@hippocampus-brt.com www.hippocampus-brt.com





2017 Hippocampus-BRT Kft., Budapest.
Minden jog fenntartva. A Felhasználói kézikönyv bármilyen formában történő sokszorosítása, másolása, fordítása – beleértve az elektronikus másolást, tárolást vagy továbbítást – kizárólag a Hippocampus-BRT Kft. írásos engedélyével lehetséges.